

### 改进的包装

i-gel无囊喉罩使用环保型材料制成的保护托架包装，这种独特的包装可以保护i-gel的结构形状。



产品编码	产品描述	型号	参考体重	每箱数量
● 8205000	适用于体型较大的成人	5	90+kg	25
● 8204000	适用于体型适中的成人	4	50-90kg	25
● 8203000	适用于体型偏小的成人	3	30-60kg	25
○ 8225000	适用于体型较大的儿童	2.5	25-35kg	10
● 8202000	适用于体型较小的儿童	2	10-25kg	10
● 8215000	适用于婴儿	1.5	5-12kg	10
● 8201000	适用于新生儿	1	2-5kg	10

Ⓢ 灭菌包装

### 敬请关注




### 英特赛克医疗器械（常州）有限公司

地址：江苏省常州市新北区辽河路1011号  
 电话：0519-69817000 传真：0519-69817001  
 邮箱：sales@i-gel.cn  
 网址：www.i-gel.cn www.intersurgical.com.cn

### 英国总公司

Crane House, Molly Millars Lane,  
 Workingham, U.K. Berkshire, RG41 2RZ  
 T: +44 (0) 118 9656 300  
 www.intersurgical.com

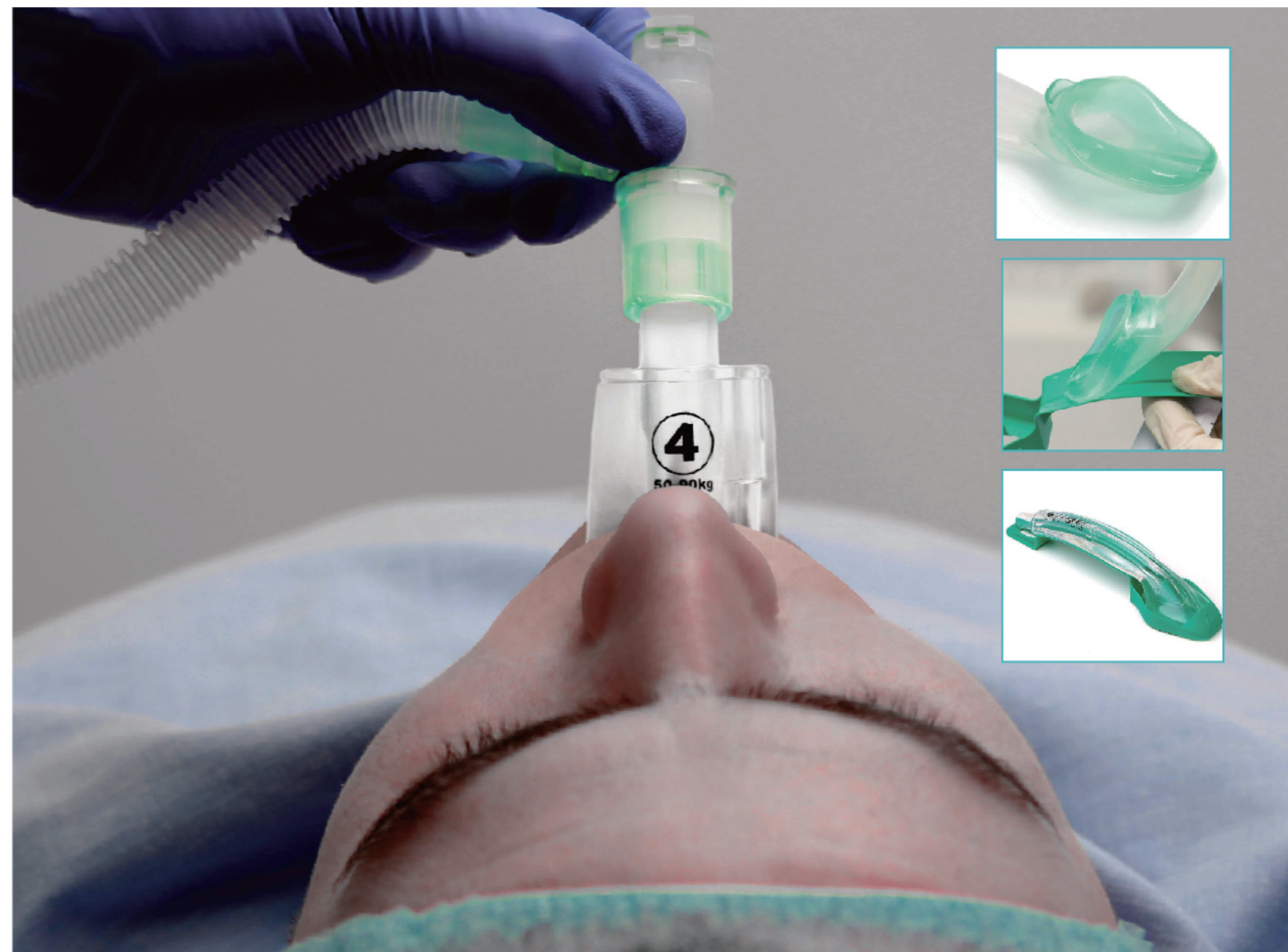

Quality, innovation and choice

优质 创新 选择



## 气道管理的变革

i-gel无囊喉罩：英国INTERSURGICAL原装进口，创新型一次性声门上气道工具。




### i-gel和自然气道的管理

i-gel是一种真正的独一无二的通气道管理器械,是数年广泛的研究和开发的结晶。研究和开发i-gel所做的一切都是为了让其与人体的组织构造紧密贴合。i-gel的设计灵感来源于喉周的组织形状及生理构造-它可以和自然气道相媲美。


### i-gel符合人体工学

形状、柔软性和轮廓非常精确地仿照着喉周的组织构造,并与之完美匹配。这种创新的理念意味着无需充气囊就可以实现建立通气道。i-gel与患者的组织构造是如此的一致,以至于明显地缓解或消除了压迫和移位所致的创伤。

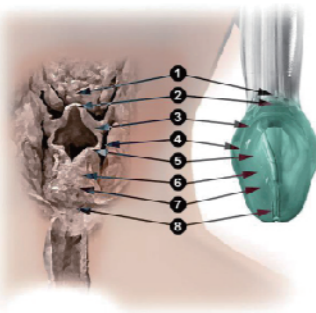

### 精准而又顺利定位

i-gel能够精确而又顺利地将其定位于喉部组织上,提供可靠的喉周密封而无需充气囊。

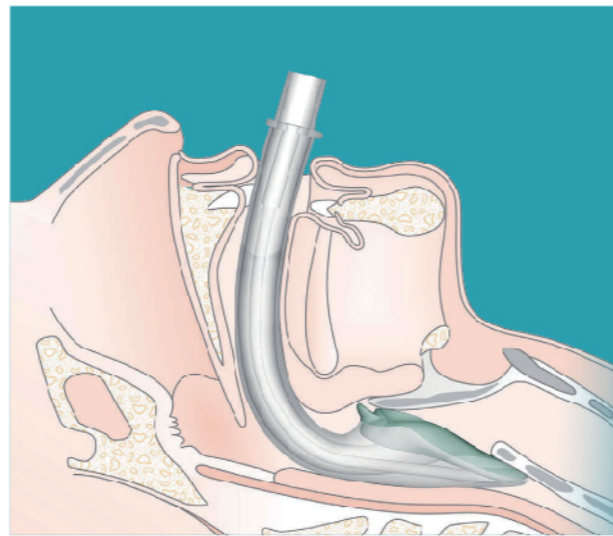

### 无需充气的囊

i-gel因其柔软似胶的原材料而得名。就是这种材料创新应用,从而开发了这种独一无二的无囊喉罩。这一关键的特性意味着使用i-gel简便、迅速且持久可靠。

### 简单、安全、快速

i-gel难以置信的容易使用,操作娴熟者只需要不到五秒钟的时间就可以成功地插好i-gel。由于其无充气囊的特性,i-gel提供了一个安全迅速的口咽通道管理解决方案。

### 成人

i-gel成人型号的适应症:由受过训练及使用呼吸道管理器械有经验的专业人员操作,用于在常规或紧急麻醉中,固定及维持空腹患者在手术中的呼吸道,既可用于自主呼吸或间歇正压通气IPPV的病人,也可用于心肺复苏中的无知觉病人。同时,对于已知或未预知的困难气道病患,i-gel还能在纤支镜的指引下引导插管。

### 儿童

i-gel现在有四种儿童规格和三种成人规格,适用于2-90公斤重的患者。

### —“罩”搞定

麻醉	胃管通道
心肺复苏	无痛纤支镜探查术
困难气道管理	纤支镜辅助插管
开放气道	儿科应用

### 附加说明

可以从www.i-gel.com网站下载i-gel使用指南、临床研究资料和其他支持文件。

## 特性和优点

i-gel具有的许多特性为患者和临床医生带来了福音。

- 中央通气道**  
对应气管插管的管径  
Size1.....最大3.0mm  
Size1.5.....最大4.0mm  
Size2.....最大5.0mm  
Size2.5.....最大5.0mm  
Size3.....最大6.0mm  
Size4.....最大7.0mm  
Size5.....最大8.0mm
- 15mm国际标准接头**  
可以与任何标准导管可靠地连接
- 胃管通道头端**
- 清晰的产品信息**  
包括尺寸型号和重量指引
- 插入深度参考线(仅成人规格有)**  
容易确认最佳插入深度
- 胃管腔道**  
对应胃管的尺寸  
Size1.....1号无胃管通道  
Size1.5.....最大10Fr  
Size2.....最大12Fr  
Size2.5.....最大12Fr  
Size3.....最大12Fr  
Size4.....最大12Fr  
Size5.....最大14Fr
- 胃管通道**  
i-gel产品上增加了胃管通道(1号除外)可以提高安全性,防止反流误吸-插入胃管进行吸引和胃肠减压。
- 一体式牙垫**  
减少气道阻塞的可能性
- 口腔稳定器**  
有助于插入并消除潜在的旋转和移位
- 会厌架**  
减少会厌下折堵塞气道的可能性
- 无需充气的囊**  
用柔软似胶的材料制成,便于插入并降低创伤
- 胃管通道末端**

在已知或未预知的困难气道中,i-gel能在纤支镜的指引下引导插管。