



### 订购信息

i-gel O<sub>2</sub> 供氧急救包套装内含有一个供氧急救型i-gel、一小袋润滑剂、一根固定带和一根胃管，所有这些都包装在一个特殊设计的透明、灭菌的硬壳内。这种独特的设计保证了对内容的保护、运输还有储存。供氧急救型i-gel带有一个有颜色标识的固定环，易于快速辨识其型号尺寸。i-gel供氧急救包共有3个成人尺寸可供选择。



8703000	i-gel 供氧急救包-包含一个3号i-gel,一袋润滑剂, 一根固定带和一根12号胃管。适用于30~60kg人群	6个/箱
8704000	i-gel 供氧急救包-包含一个4号i-gel,一袋润滑剂, 一根固定带和一根12号胃管。适用于50~90kg人群	6个/箱
8705000	i-gel 供氧急救包-包含一个5号i-gel,一袋润滑剂, 一根固定带和一根12号胃管。适用于90+kg人群	6个/箱

### 敬请关注



#### 英特赛克医疗器械（常州）有限公司

地址：江苏省常州市新北区辽河路1011号  
 电话：0519-69817000 传真：0519-69817001  
 邮箱：sales@i-gel.cn  
 网址：www.i-gel.cn www.intersurgical.com.cn

#### 英国总公司

Crane House, Molly Millars Lane,  
 Wokingham, Berkshire, United Kingdom  
 T: +44 (0) 118 9656 300  
 www.intersurgical.com



**i-gel<sup>®</sup> O<sub>2</sub>™ 供氧急救包**  
 四合一套装，为您着想



气道管理 · 气道工具



优质，创新，选择  
 Quality, innovation and choice



在急救过程中，您所需要的器械是使用简单、快捷并且安全可靠的。i-gel O<sub>2</sub> 供氧急救包包括了您准备、置入以及快速有效固定i-gel所需要的一切：一个供氧急救型i-gel、一袋润滑剂、一根固定带和一根胃管。

供氧急救型i-gel增加了一个额外的氧气接口以及一个和固定带配合使用的固定环。

供氧急救型i-gel被设计为一种用于标准心肺复苏操作的辅助通气装置。这些操作是由欧洲心肺复苏理事会和美国心脏协会推荐的。并且，急救型i-gel集成了一个额外的氧气接口，所以还能用于心肺复苏操作中的被动供氧或被动气道管理。



## 自2007年以来通气道器械的创新



i-gel是英特赛克推出的创新型第二代声门上通气道器械，于2007年正式上市。i-gel从最初出现喉罩开始最大的进步就是改变了传统的气道管理类器械（喉罩）的面貌并且已经在世界范围内被广泛应用于手术麻醉和心肺复苏。

### 免充气的囊

急救供氧型i-gel的名字来源于本身使用的柔软、凝胶样的材料。这种材料的创新型应用创造出这款独一无二的无囊喉罩。这就意味着在喉罩置入前后不需要抽气和充气，同时又能保证其密封性，这样大大缩短并简化了准备和插入的流程。

### 插入

急救供氧型i-gel使用非常简单，插入过程非常快并且通常情况下不到5秒即可完成。i-gel其本身的设计决定了它使用操作的简易性而且安全可靠，并且插入时不需将手指伸进病人的口中。

### 固定

i-gel供氧急救包内有一条特殊设计的固定带用于i-gel的固定。固定很简单，只需将固定带穿过病人颈部下方，而后将其圆孔套在i-gel自带的固定环的突起上即可。这样对某些不适合使用粘性胶带的患者（例如病人有胡须）就非常理想。

## i-gel O<sub>2</sub> 供氧急救包

**15mm国际标准接头**  
可以与任何标准导管可靠地连接

**胃管通道头端**

**带色标的固定圈**  
可以与固定带共同使用固定i-gel®

**清晰的产品信息**  
快速清晰的参考。包括尺寸型号和体重指引。

**插入深度参考线**



**额外的供氧接口**  
心肺复苏（CCR）中作为被动供氧接口

**胃管通道**  
提高安全性，防止反流误吸

**一体式牙垫**  
减少通气道被咬合而闭塞的可能性

**口腔稳定器**  
有助于插入并消除潜在的旋转和位移

**会厌架**  
减少会厌下折的可能性，防止呼吸道阻塞

**无需充气的囊**  
减少了喉罩插入后充气的步骤，使得插入更简单快捷

**胃管通道的末端**



i-gel供氧急救包有3种成人尺寸可供选择，内含：

- 供氧急救型i-gel
- 润滑剂-保证插入简单、快速
- 固定带-固定i-gel
- 12号的胃管-通过胃管腔道置入以引流排空胃内液体