



无创呼吸面罩及管路指南



重症监护 · 无创呼吸

敬请关注



英特赛克医疗器械（常州）有限公司

地址：江苏省常州市新北区辽河路1011号
 电话：0519-69817000 传真：0519-69817001
 邮箱：sales@i-gel.cn
 网址：www.i-gel.cn www.intersurgical.com.cn

英国总公司

Crane House, Molly Millars Lane,
 Wokingham, Berkshire, United Kingdom
 T: +44 (0) 118 9656 300
 www.intersurgical.com



优质，创新，选择
 Quality, innovation and choice

本指南的目的是展示我们的无创呼吸面罩及其能够匹配的管路。针对特定的设置需求，请务必参阅您的无创呼吸设备所提供的用户指南。

带安全阀无创呼吸面罩

这种面罩上有集成的孔或排气口，以去除呼出的二氧化碳。带安全阀面罩也可以称为带孔面罩或带有二氧化碳泄漏口的面罩。这些面罩有一个防窒息阀，当呼吸机出现意外故障或呼吸系统断开时，它可以打开，让患者从大气中自然呼吸。

本页所示的面罩均为带防窒息阀的通气面罩。这种面罩可以用于不包含内置二氧化碳泄漏口的单管呼吸回路。

能够配合这种面罩一起使用的英特赛克呼吸回路见第2页。

FaceFit 无创带孔面罩——带安全阀和CO₂泄漏口

用于不含有CO₂泄漏口的单管呼吸回路



咨询

Video available at www.intersurgical.com



产品编码	描述	包装数量
2252000	FaceFit,无创带孔面罩,带有安全阀和CO ₂ 泄漏口,成人大号	12
2251000	FaceFit,无创带孔面罩,带有安全阀和CO ₂ 泄漏口,成人中号	12
2250000	FaceFit,无创带孔面罩,带有安全阀和CO ₂ 泄漏口,成人小号	12


FaceFit无创面罩特点和优势

- 可调节头部衬垫**
适合大多数患者
- 材质轻**
提升患者舒适度
- 操作简单的可调节头带以及快速释放机制**
使面罩可以快速从患者面部移除
- 安全阀 (仅带孔面罩)**
在通气不足的情况下防止重复呼吸
- CO₂泄漏口 (仅带孔面罩)**
用于有效的CPAP和双水平通气
- 低死腔量**
提供更多的呼吸支持
- 6mm接头带一体式盖帽**
用于补充供氧或监测
- 柔软的硅胶密封**
保证最佳性能

Video available at www.intersurgical.com



不带CO₂泄漏口的呼吸回路 不带压力监测管的单管呼吸回路

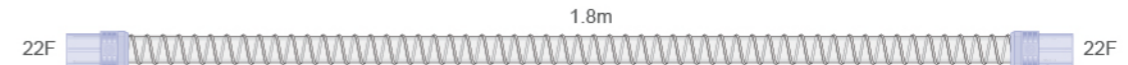


system illustrated

产品编码	描述	包装数量
5018000(S*)	22mm平纹管带柔软接头, 22F-22F, 1.8m	20 (25*)
5218000	22mm Eco环保平纹管带柔软接头, 22F-22F, 1.8m	20
5020000(S*)	22mm平纹管带柔软接头, 22F-22F, 2.0m	20 (30*)

咨询

带CO₂泄漏口的呼吸回路 不带压力监测管的单管呼吸回路

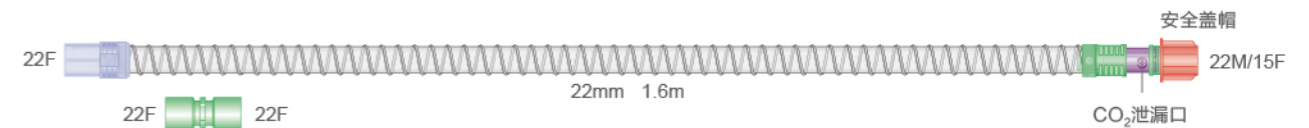


system illustrated

产品编码	描述	包装数量
5804000	22mm 成人/儿童平纹管双水平呼吸回路带360度可旋转接头与CO ₂ 泄漏口, 1.8m	30

咨询

带压力监测管的单管呼吸回路

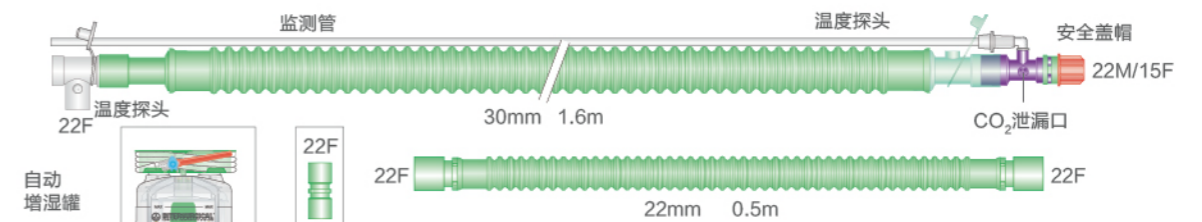

system illustrated

产品编码	描述	包装数量
5805000	22mm成人/儿童平纹管双水平呼吸回路带360度可旋转接头, CO ₂ 泄漏口和监测管, 1.6m	25
2031000	30mm成人波纹管双水平加热导线回路, 带360度可旋转接头, CO ₂ 泄漏口, 监测管和自动增湿罐以及0.5m单管, 1.6m	6

咨询

无排气孔的无创呼吸面罩

无排气孔的无创呼吸面罩没有集成的泄漏端口，也没有防窒息阀。这些面罩可以用于重症监护室的双管呼吸回路以及带有二氧化碳泄漏口的双水平单管呼吸回路。

适合使用这种类型的面罩的英特赛克呼吸回路展示在第4页。

您还可以通过访问www.intersurgical.com找到完整系列的机器保护过滤器、热湿交换器和热湿交换过滤器产品。

Facefit 无创呼吸面罩-无安全阀和CO₂泄漏口

用于双管呼吸回路

咨询



Video available at www.intersurgical.com



产品编码	描述	包装数量
2255000	FaceFit, 无创呼吸面罩, 成人小号	12
2256000	FaceFit, 无创呼吸面罩, 成人中号	12
2257000	FaceFit, 无创呼吸面罩, 成人大号	12

FaceFit无创面罩特点和优势

可调节头部衬垫
适合大多数患者

材质轻
提升患者舒适度

操作简单的可调节头带
以及快速释放机制
使面罩可以快速从患者
面部移除

安全阀 (仅带孔面罩)
在通气不足的情况下防止重复呼吸

CO₂泄漏口
(仅带孔面罩)
用于有效的CPAP和双水平通气

低死腔量
提供更多的呼吸支持


6mm接头带一体式盖帽
用于补充供氧或监测

柔软的硅胶密封
保证最佳性能

Video available at www.intersurgical.com




双管呼吸回路 用于被动增湿的波纹管呼吸回路

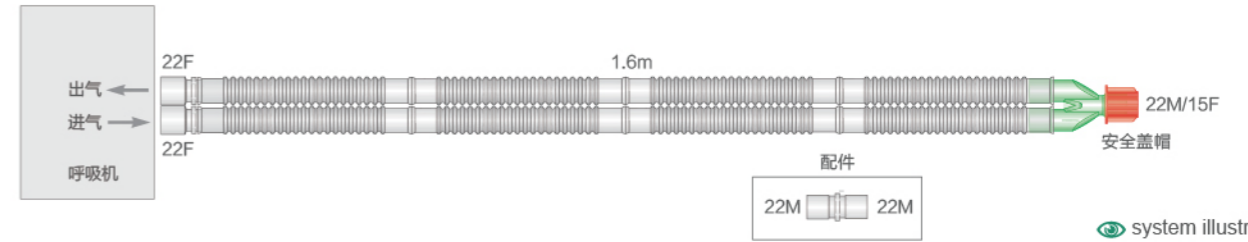

产品编码	描述	包装数量
2000000 (S*)	22mm波纹管呼吸回路, 1.6m	20 (15*)
2006000	22mm波纹管呼吸回路, 2m	15

咨询


用于被动增湿的平纹管呼吸回路

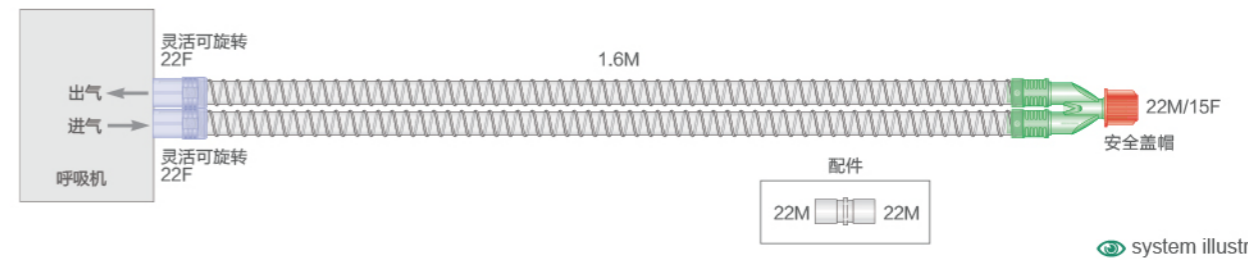

产品编码	描述	包装数量
5000000 (S*)	22mm平纹管呼吸回路, 1.6m	12 (20*)
5001000 (S*)	22mm平纹管呼吸回路, 2m	15 (15*)

咨询

用于主动增湿的波纹管呼吸回路

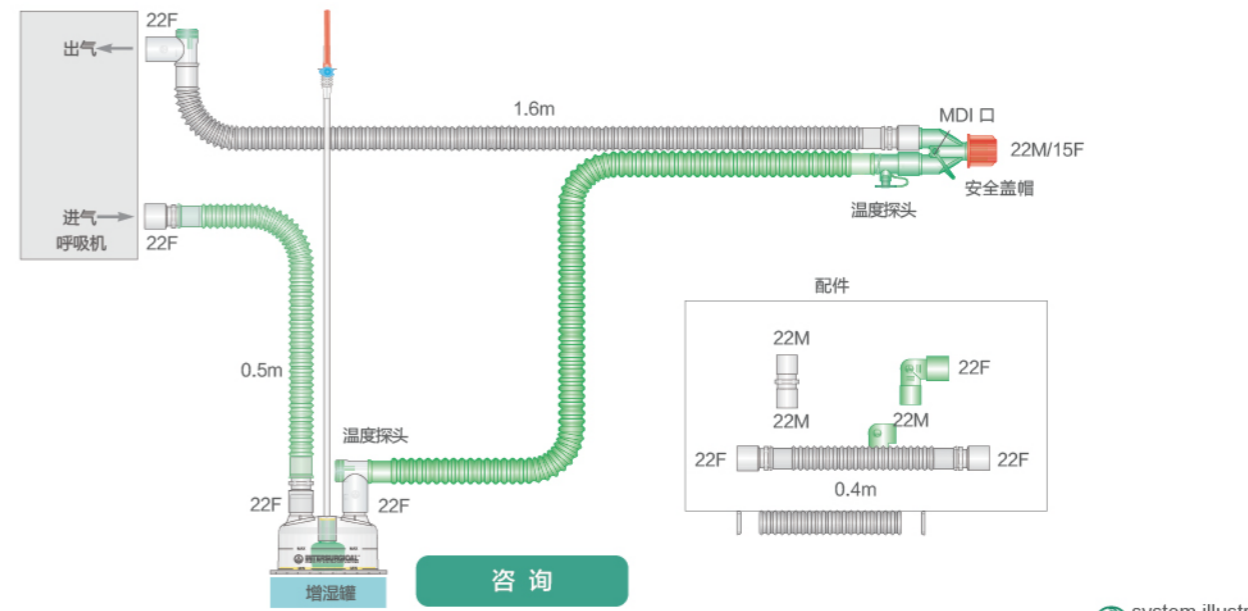

产品编码	描述	包装数量
2026000	22mm 波纹管双加热呼吸回路带0.5m单管, 1.6m	10
2026310(S*)	22mm 波纹管双加热呼吸回路带自动增湿罐和0.5m单管, 1.6m	7 (6*)

咨询

新双水平呼吸回路系列

主要是介绍新型的Flextube™波纹管双水平呼吸回路系列，该呼吸回路兼容所有需要单管呼吸系统的涡轮驱动双水平呼吸机。

双水平系列提供了与标准无创呼吸面罩配套使用的带CO₂泄漏口的呼吸系统解决方案，以及与带孔无创呼吸面罩配套使用的不带CO₂泄漏口的呼吸系统解决方案。对于不需要进行压力监测的机器我们也提供没有近端气道压力监测管的呼吸回路。

新的呼吸回路系列适用于成人和儿童患者。


由于双水平通气的高流量，成人通气的最佳解决方案是30mm波纹管主动增湿呼吸回路，而儿童通气的最佳解决方案是22mm波纹管主动增湿呼吸回路。

在呼吸回路的加热丝段增加管子的直径，有助于大大降低气体流速，减缓气流量，增加气体与加热丝的接触，从而在不影响流速的情况下提高效率。

我们也提供平纹管被动增湿双水平呼吸回路，因为平纹管能够为干燥、高流量的气体提供了一个完美的解决方案。




30mm 波纹管主动增湿双水平呼吸回路（成人）

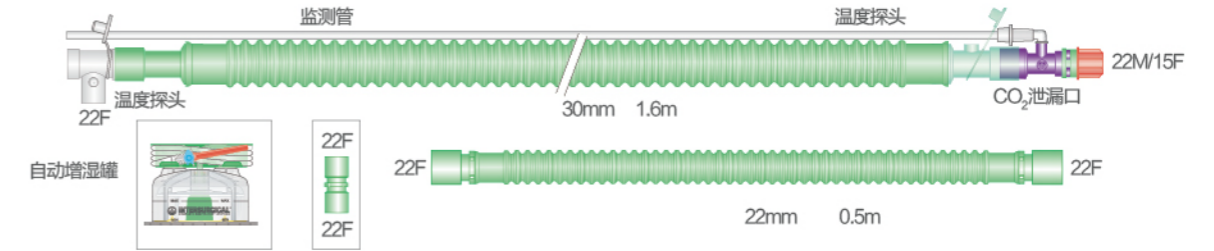

system illustrated

产品编码	描述	包装数量
2031000	30mm成人波纹管带加热丝双水平呼吸回路，带360度可旋转接头，CO ₂ 泄漏口，监测管，自动增湿罐和0.5m单管，1.6m	6

22mm 平纹管被动增湿双水平呼吸回路

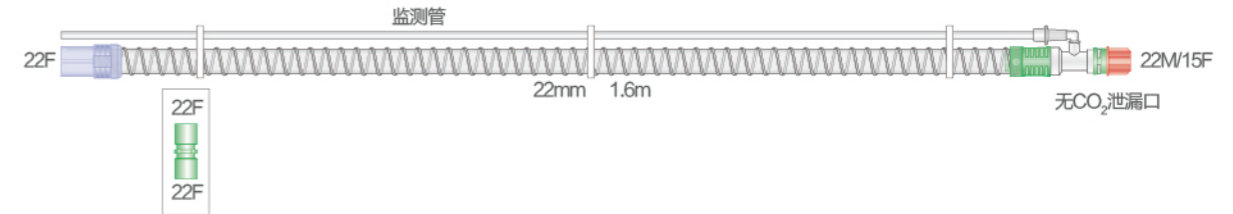

system illustrated

产品编码	描述	包装数量
5805000	22mm成人/儿童平纹管双水平呼吸回路带360度可旋转接头，CO ₂ 泄漏口和监测管，1.6m	25
5808000	22mm成人/儿童平纹管双水平呼吸回路带360度可旋转接头，CO ₂ 泄漏口和分离式监测管，1.6m	25
5804000	22mm成人/儿童平纹管双水平呼吸回路带360度可旋转接头，CO ₂ 泄漏口，1.8m	30
5018000	22mm成人/儿童平纹管带柔软接头22F-22F，1.8m	20



FaceFit 不带孔无创呼吸面罩用于带CO₂泄漏口的双水平单管呼吸回路，可用于2031000双水平呼吸回路



FaceFit 带孔无创呼吸面罩用于不带CO₂泄漏口的双水平单管呼吸回路，可用于5805000，5808000，5804000，5018000双水平呼吸回路